


INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SALIVE

Attendez 30 minutes après avoir mangé, bu, fumé, ou après avoir brossé vos dents ou avoir mastiqué de la gomme à mâcher. **Ne PAS retirer le film plastique** du couvercle de l'entonnoir.

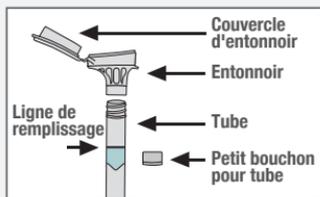

Étiqueter avec la date de prélèvement, vos initiales et votre date de naissance (D.D.N.)

INSTRUCTIONS
VIDÉO



POUR LES
INSTRUCTIONS DANS
D'AUTRES LANGUES



Instructions pour le prélèvement

La plupart des personnes prennent entre 2 et 5 minutes pour fournir un échantillon de salive en suivant les étapes 1 à 5*



Crachez une PETITE quantité de salive dans l'entonnoir. Tapez doucement la base du tube sur une surface plane pour aider la salive à entrer dans le tube. **Vérifiez que le liquide salivaire (pas les bulles) atteint la ligne de remplissage indiquée dans l'image n° 1.**



Tenez le tube en position verticale avec une main. **Fermez le couvercle de l'entonnoir** avec l'autre main (comme illustré) **en poussant fermement le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic sonore.** Le liquide contenu dans le couvercle sera libéré dans le tube et se mélangera à la salive. Assurez-vous que le couvercle soit bien fermé.



ACTIVATION DU KIT :

Veillez activer votre kit en utilisant le code alphanumérique indiqué. (Voir l'exemple dans l'image ci-dessous)



Tenez le tube à la verticale. **Dévisser l'entonnoir du tube.**



Prenez le petit bouchon du tube. **Utilisez le petit bouchon pour fermer hermétiquement le tube.**



Agitez le tube fermé pendant 5 secondes. Jetez ou recyclez l'entonnoir.

RETOURNEZ LA CARTE POUR
LES INSTRUCTIONS D'EXPÉDITION

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SALIVE

Instructions d'expédition



Remettez le **flacon scellé et étiqueté** dans l'étui en plastique.




Placez l'étui dans le **Sac Bio** fourni et retirez le joint adhésif.




ACTIVATION DU KIT :

Veillez activer votre kit en utilisant le code alphanumérique indiqué. [Voir l'exemple dans l'image ci-dessous]

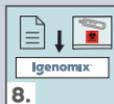

Remettez l'échantillon et les documents **dans la boîte du kit.**

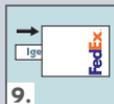

Placez la boîte dans le Pak clinique **et apposez l'étiquette de retour.** Enregistrez la fiche du document pour vos archives. Le Pak clinique peut être déposé dans n'importe quel centre d'expédition FedEx. Pour toute assistance, veuillez contacter logistics@igenomix.com